
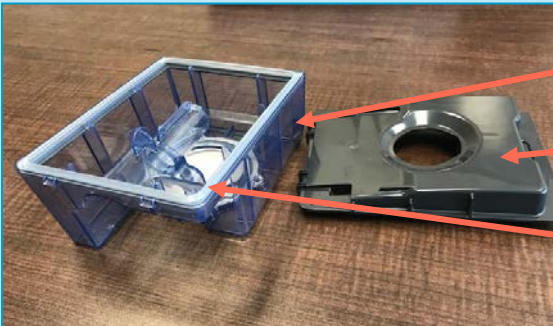





Article	Tous les jours	Toutes les semaines	Mensuel
<b>Masque</b>	Laver à la main avec un savon doux*. Rincer et sécher à l'air libre. Avant utilisation, s'assurer que les valves expiratoires ne soient pas obstruées.	*Un savon doux est un savon SANS émoullissants, ni ingrédients antibactériens.	
<b>Coussin du masque</b>	Essuyer à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux*. Rincer et sécher à l'air libre.	<i>Le saviez-vous?</i> Il se peut que vous ne deviez remplacer le coussin de votre masque que lorsque vous constatez que votre masque n'est plus étanche.	
<b>Harnais du masque</b>		Laver à la main avec un savon doux* ou placer dans une taie d'oreiller et laver au cycle délicat de la machine à laver avec un savon doux*.	
<b>Circuit respiratoire</b>	 Élément chauffant	Retirer le circuit respiratoire de l'humidificateur et du masque. Inspecter pour des dommages (fissures, déchirures, perforations, etc.) et remplacer si nécessaire. Laver le circuit respiratoire dans de l'eau tiède avec un savon doux*, <i>en évitant de mouiller l'élément chauffant</i> . Rincer et sécher à l'air libre.	<i>Numéro de pièce de l'élément chauffant</i> SYS1HT15
<b>Réservoir d'eau</b>	Éteindre la BiPAP A40™. Faire glisser le réservoir d'eau hors de la base de l'humidificateur (voir page 2). Retirer le couvercle du réservoir et vider l'eau restante. Laver le réservoir et le couvercle avec de l'eau tiède et un savon doux quotidiennement. Essuyer délicatement le joint d'étanchéité. Rincer et sécher à l'air libre. Au lieu de les laver à la main, les pièces de l'humidificateur peuvent être lavées au lave-vaisselle (tablette supérieure).	En plus du nettoyage quotidien, faire tremper dans une solution de vinaigre et d'eau tiède (1 partie de vinaigre pour 10 parties d'eau) pendant 30 minutes. Rincer et sécher à l'air libre. 	Base du réservoir d'eau Couvercle du bac à eau Joint d'étanchéité
<b>Filtres à air</b>		Toutes les 2 semaines, laver le filtre <b>gris</b> à la main avec de l'eau tiède et un savon doux*. Bien rincer et sécher à l'air libre. Remplacer à tous les 6 mois.  Numéro de pièce du filtre double REF 1029416	Ne pas laver le filtre <b>blanc</b> . Remplacer mensuellement, ou plus fréquemment s'il est souillé.
<b>Machine</b>	S'assurer de débrancher le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez votre équipement. Détacher le module de batterie et retirer la batterie amovible avant de nettoyer le module. Remplacer la batterie une fois que le module est complètement sec.	Module de batterie amovible BiPAP A40™ Humidificateur System One 	Essuyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux*.

# BiPAP A40™ Humidificateur System One™



## ÉTAPE 1

Éteindre l'humidificateur System One™ et la BiPAP A40™ .  
Laisser la plaque chauffante et l'eau refroidir pendant environ 15 minutes avant de les nettoyer.

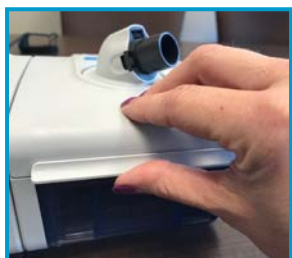

## ÉTAPE 2

Soulever le couvercle de l'humidificateur.



## ÉTAPE 3

Saisir simultanément le haut et le bas du réservoir pour le faire sortir de la base de l'humidificateur.



## ÉTAPE 4

Pousser la languette intérieure comme indiqué pour retirer le couvercle du bac à eau.  
Nettoyer comme indiqué à la page 1.

### Avertissement

Ces informations vous sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme une alternative aux conseils professionnels de votre médecin ou de tout autre professionnel de la santé qualifié. Le VEP n'assume aucune responsabilité quant à l'application du contenu de ce document ou pour toute information qui pourrait être présente dans les documents ou les sites Web cités comme référence. Ces références sont fournies à titre informatif uniquement et ne représentent en aucun cas l'approbation par VEP de toutes entreprises ou de tous produits. Veuillez toujours consulter un médecin et / ou un professionnel de la santé qualifié pour en

### Références

1. Manuel de l'utilisateur de la BiPAP A40™ de Philips Respironics™
2. Manuel de l'utilisateur de l'humidificateur chauffant System One™ de Philips Respironics™



640 Catarqui Woods Drive | Unité 6 | Kingston, Ontario | K7P 2Y5  
Tél. : 613-548-6156 | Sans frais en Ontario : 1-800-633-8977 |  
Fax : 613-548-6157  
Site Web : [www.ontvep.ca](http://www.ontvep.ca)