




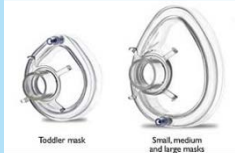


Photos courtoisie de Philips™ www.philips.ca/healthcare/product/HC1098159/cough-assist-e70-ventilation


Article	Tous les jours	Toutes les semaines
Masque	<p>Inspecter après chaque utilisation. S'il est souillé, le laver à la main avec un savon doux*. Rincer et sécher à l'air.</p>	 <p>*Un savon doux est un savon SANS émoullissants, ni ingrédients antibactériens.</p>
Adapteur trachéal	<p>Inspecter après chaque utilisation. S'il est souillé, le laver à la main avec un savon doux*. Rincer et sécher à l'air.</p>	 <p>Un adapteur trachéal est un connecteur standard de 15 mm de diamètre intérieur / 22 mm de diamètre extérieur.</p>
Circuit respiratoire <i>lisse non ondulé</i>	<p>Examiner le circuit respiratoire après chaque utilisation. S'il est souillé, le laver soigneusement à l'eau tiède avec un détergent doux, bien rincer et sécher à l'air. Numéro de référence Respironics RES532316</p>	<p>Retirer le circuit respiratoire du filtre bactérien à la sortie de la machine. Inspecter pour des dommages (fissures, déchirures, perforations, etc.) et remplacer si nécessaire. Laver le circuit respiratoire à l'eau tiède avec un savon doux*. Rincer et sécher à l'air.</p>
Filtre bactérien	 <p>Toujours utiliser un filtre bactérien à la sortie de la machine. NE PAS laver le filtre bactérien.</p>	<p>Remplacer le filtre une fois par mois ou plus souvent s'il est humide ou souillé. Numéro de référence Respironics RES20801</p>
Filtre d'entrée d'air	 <p>Filtre d'entrée d'air. Numéro de référence Respironics 099477</p>	<p>Laver à l'eau tiède avec un savon doux et sécher à l'air. Laver aux 2 semaines et remplacer aux 6 mois.</p>
Machine	<p>ÉTEINDRE l'appareil et DÉBRANCHER le cordon d'alimentation avant le nettoyage.</p>	<p>Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon propre imbibé d'eau et de savon doux*.</p>

Conseil utile

Certains clients utilisent le CoughAssist E70™ plusieurs fois par jour. Il peut être utile de garder à disposition quelques sections plus courtes de circuit respiratoire ondulé pour piéger les sécrétions avant qu'elles ne salissent le long circuit respiratoire. Cette section de circuit respiratoire plus courte peut être jetée et remplacée entre les traitements.

Raccord du masque
ou de l'adaptateur trachéal

Connecteur 15 / 22 mm

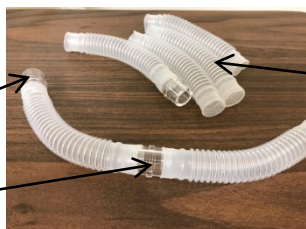

Circuit respiratoire de 6 pouces (circuit respiratoire de 72 pouces en sections de 6 pouces pré-marquées)

Numéro de référence HUD1518



Le circuit respiratoire, le masque, le connecteur de 15/22 mm et le filtre bactérien peuvent être achetés en trousse.

Numéro de référence Respironics RES1090833

Références

1. Manuel d'utilisation du CoughAssist E70™ de Philips Respironics™
2. CANVent Canadian Alternatives in Noninvasive Ventilation <http://www.canventottawa.ca/>

Avertissement

Ces informations vous sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme une alternative aux conseils professionnels de votre médecin ou de tout autre professionnel de la santé qualifié. Le VEP n'assume aucune responsabilité quant à l'application du contenu de ce document ou pour toute information qui pourrait être présente dans les documents ou les sites Web cités comme référence. Ces références sont fournies à titre informatif uniquement et ne représentent en aucun cas l'approbation par VEP de toutes entreprises ou de tous produits. Veuillez toujours consulter un médecin et / ou un professionnel de la santé qualifié pour en apprendre davantage sur les recommandations spécifiques à vos besoins de santé.



640 Cataraqui Woods Drive | Unité 6 | Kingston, Ontario | K7P 2Y5 Tél. : 613-548-6156 | Sans frais en Ontario : 1-800-633-8977 | Téléc. : 613-548-6157
Site Web: www.ontvep.ca