
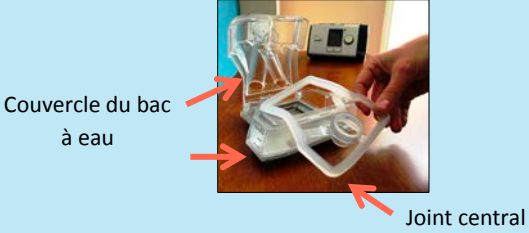






Article	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel
<b>Masque</b>	Laver à la main à l'aide d'un savon doux*. Rincer et sécher à l'air libre. Avant l'utilisation, vérifier que les valves d'expiration ne sont pas obstruées.	*Un savon doux est un savon sans émoullients ni ingrédients antibactériens.	
<b>Bulle du masque</b>	Essuyer à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux*. Rincer et sécher à l'air libre.	<i>Le saviez-vous?</i> Vous devrez peut-être remplacer la bulle de votre masque si vous constatez que votre masque n'est plus étanche.	
<b>Harnais</b>		Laver à la main à l'aide d'un savon doux* ou bien, placer dans une taie d'oreiller et laver au cycle délicat de la machine à laver à l'aide d'un savon doux*.	
<b>Circuit respiratoire</b>	Déconnecter le circuit respiratoire du ClimateLine Air <sup>MC</sup> en pinçant les boutons de dégagement situés sur le manchon, puis retirer le circuit respiratoire de l'appareil.  Numéros de pièce : SlimLine <sup>MC</sup> REF 36810 ClimateLine Air <sup>MC</sup> REF 37296 ClimateLine Air <sup>MC</sup> Oxy REF 37357 (à utiliser avec de l'oxygène)	Débrancher le circuit respiratoire de la sortie et du masque. Inspecter le circuit respiratoire pour des dommages (fissures, déchirures, perforations, etc.) et remplacer si nécessaire. Rincer le circuit respiratoire et laisser sécher, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de la chaleur.	Remplacer le circuit respiratoire tous les 6 mois. <sup>2</sup>
<b>Bac à eau</b>	Mettre l'Aircurve <sup>MC</sup> 10 ST-A hors tension. Retirer le bac à eau de l'HumidAir <sup>MC</sup> de l'appareil. Ouvrir le couvercle du bac à eau et vider l'eau qui reste. Laver le bac et le couvercle à l'eau tiède et au savon doux à tous les jours. Essuyer délicatement le joint central. Rincer et sécher à l'air libre.		Ne pas laver au lave-vaisselle ou à la machine à laver. <sup>3</sup>

<p><b>Filtre à air</b></p>	<p>Utiliser un filtre à air en tout temps pour empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans l'appareil.<sup>1</sup> Ne pas laver le filtre à air blanc.</p> <p>Filtre à air standard numéro de pièce REF 36850 Filtre hypoallergénique</p>	 <p>Ouvrir le couvercle du filtre à air pour remplacer le filtre</p>	<p>Remplacer le filtre standard tous les 6 mois. Remplacer le filtre hypoallergénique tous les mois.</p>
<p><b>Appareil</b></p>	<p>Veiller à débrancher le cordon d'alimentation lors du nettoyage de l'équipement AirCurve<sup>MC</sup> 10 ST-A.</p>	 <p>AirCurve<sup>MC</sup></p> <p>HumidAir<sup>MC</sup></p>	<p>Essuyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux*</p>

### Références

1. Guide de l'utilisateur du ResMed AirCurve<sup>MC</sup> 10 ST-A. ResMed Itée. 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australie, 2017
2. Guide de l'utilisateur du ClimateLineAir<sup>MC</sup>. ResMed Itée. 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australie, 2017

### Avertissement

Ces renseignements vous sont fournis à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme une alternative aux conseils professionnels de votre médecin ou de tout autre professionnel de la santé qualifié. Le VEP n'assume aucune responsabilité quant à l'application du contenu du présent document ou pour tout renseignement qui pourrait être présent dans les documents ou les sites Web cités comme référence. Ces références sont fournies à titre informatif uniquement et ne représentent en aucun cas l'approbation par le VEP de toutes entreprises ou de tous produits. Veuillez toujours consulter un médecin et / ou un professionnel de la santé qualifié pour en apprendre davantage sur les recommandations spécifiques à vos besoins de santé.



640, Cataraqi Woods Drive | Bureau 6 | Kingston | Ontario | K7P 2Y5  
Tél. : 613 548-6156 | Sans frais en Ontario : 1 800 633-8977 |  
Télec. : 613 548-6157  
Site Web : [www.ontvep.ca](http://www.ontvep.ca)